

Plaques thermoformables

ECT0110 | Paquet de 10 plaques : 0.75mm x 125mm
Avec feuille de protection.

INDICATIONS

Fabrication d'aligneurs orthodontiques par thermoformage,
d'appareil orthodontiques de contention

Paramètres de thermoformage :

Température 220°C, Temps 20-25 secondes.

Veillez effectuer un réglage précis en fonction de votre
équipement pour obtenir un résultat parfait.

Code Biostar/Ministar : 112 (25secs)

Composition : Polyuréthane thermoplastique (TPU)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Attention : Les plaques sont emballées sous vide.

Veillez utiliser rapidement votre plaque après l'avoir retirée de son
emballage. Evacuez l'air et fermez le sachet pour garder les autres
plaques au sec.

- Ne pas utiliser d'alcool (Ethanol) et/ou un produit de nettoyage
à base d'agent végétal
- Ne pas faire tremper
- Ne pas asperger d'eau, ne pas utiliser d'eau chaude

CONTRE-INDICATIONS

Il est interdit d'utiliser ce produit en cas de risque d'allergie.

TRANSPORT & CONDITIONS DE STOCKAGE

- Ne pas exposer directement au soleil lors du transport
- Stocker à température ambiante dans un endroit sec, bien ventilé sans présence de gaz corrosif

IMPORTANT :

Tout incident grave survenu à la suite de l'utilisation de ce dispositif devra être notifié au fabricant ainsi qu'à l'autorité de tutelle de l'état membre où est établi le patient / utilisateur.



Dental Plates for thermoforming

ECT0110 | Pack of 10 plates: 0.75mm x 125mm
With protective sheet.

INDICATIONS

Manufacture of orthodontic aligners by thermoforming, orthodontic appliances for retention

Thermoforming parameters :

Temperature 220°C, Time 20-25 seconds.

Please make a precise setting according to your equipment to obtain a perfect result.

BioStar/Ministar code: 112 (25secs)

Composition : Thermoplastic polyurethane (TPU)

PRECAUTIONS FOR USE

Attention: The plates are vacuum-packed.

Please use your plate promptly after removing it from its packaging. Evacuate the air and close the bag to keep the other plates dry.

- Do not use alcohol (Ethanol) and/or cleaning agents with a vegetable base
- Do not soak
- Do not spray with water, do not use hot water

CONTRAINDICATIONS

It is forbidden to use this product material allergic.

TRANSPORT & STORAGE CONDITIONS

- Do not expose to direct sunlight during transport
- Store at room temperature in a dry, well-ventilated area, free from corrosive gases

IMPORTANT :

Any serious incident arising from the use of this device shall be reported to the manufacturer and to the regulatory authority of the Member State where the patient/user is established.

