

PROCÉDURE DE MONTAGE D'UN AXIOSPLIT® ASP

(exemple de montage sur un articulateur SAM 2P)

Matériel nécessaire:

- Articulateur avec verrouillage à vis
- Kit AXIOSPLIT®
- Tige et socle d'ajustage
- Résine
(Résine GC Pattern)



1

- Enlever la plaque de montage et la tige incisive
- Régler l'angle de Bennett sur 5°
- Régler l'angulations du déplacement du boîtier condylien sur 45°
- Verrouillage des vis
- Visser la plaque AXIOSPLIT® supérieure (A) en place
- Poser la partie supérieure de l'articulateur à l'envers



2

- Visser la cale AXIOSPLIT® (B) sur la partie basse de l'articulateur
- Fixer la tige de réglage de hauteur (C) à l'aide de la vis de la tige incisive
- Poser le socle d'ajustage (D) sur la partie haute de l'articulateur
- Poser la plaque AXIOSPLIT® creuse (E) sur le socle d'ajustage
- Déposer 3 boules de résine à l'intérieur de la plaque AXIOSPLIT® creuse



3

- Superposer les parties de l'articulateur
- Serre les vis des boîtiers condyliens
- Maintenir jusqu'au durcissement de la résine
- Mettre les rondelles de protection (F) sur les vis de serrage (G)

