




Mode d'Emploi


1 Diluer le contenu du sachet dans 150 ml d'eau. Rincer l'appareil à nettoyer à l'eau claire et le mettre dans la solution.



2 Laisser tremper pendant environ 30 min. La solution reste active pendant 3 à 4 jours au maximum.

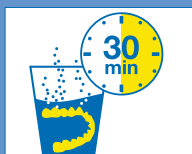

3 Enlever les dépôts restants avec une brosse à dents, puis rincer de nouveau à l'eau claire.

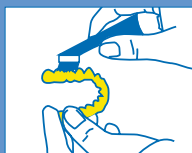

4 Appliquer le spray de soins CETRON® avant d'insérer l'appareil - pour un gout rafraîchissant au citron!



cetron®



Produit de soins et de nettoyage

pour plaques d'ortho, gouttières, prothèses dentaires et protège-dents

Remis par :





cetron®

Pour une bonne hygiène

Le contact avec les aliments, boissons et médicaments ainsi que le milieu buccal entraîne avec le temps des dépôts, changements de couleur et laisse un mauvais goût et de mauvaises odeurs sur vos gouttières, plaques d'orthodontie et prothèses dentaires.

CETRON®, c'est la solution de nettoyage optimale, car elle nettoie vos gouttières rapidement, de façon douce et efficace.

Vous pouvez l'utiliser pour le nettoyage des dépôts et le rafraîchissement de tous les appareils d'orthodontie ainsi que les prothèses dentaires.



Le spray de soins à appliquer directement avant d'insérer gouttière, plaque d'ortho etc.



Le sachet à 15 g pratique pour l'usage par le patient. Le contenu est dissous dans la boîte de rangement adaptée.