




## INSTRUCTIONS DE MONTAGE D'UN JOINT SOUPLE

**ATTENTION : Le sachet ci joint contient 3 billes et un joint, merci de lire les instructions ci-dessous avant utilisation.**

Concerne les clés embout pour mini-vis tête bracket (ECG0300 & ECG0310)



Cette clé embout présente à une de ses extrémités, 3 logements dans lesquels devront s'insérer 3 billes qui, à leur tour, seront maintenues par un joint souple.

<p><b>Etape 1 :</b> Insérer une des 3 billes dans son logement et maintenez là avec le nouveau joint souple.</p> 	<p><b>Etape 2 :</b> A l'aide d'une sonde ou de tout instrument permettant de déplacer le joint sans l'abîmer, soulever le partiellement.</p> 	<p><b>Etape 3 :</b> Tout en maintenant le joint entrouvert, avec une précelle fine introduisez la seconde bille dans son logement.</p> 	<p><b>Etape 4 :</b> Laisser le joint se remettre en place pour maintenir les 2 billes. Répétez l'opération avec la 3<sup>ème</sup> et dernière bille.</p>
---	---	--	---

**Etape 5 :**  
Clipser une mini vis tête bracket pour tester votre changement de joint