



## NOTICE D'INSTRUCTIONS MODEL GLOS (réf. ECM0207)

### COMMENT NETTOYER VOS MODELES EN PLATRE ?

MODEL GLOSS donne une belle finition lisse et lustrée aux modèles et permet de les laver par la suite.

#### **Instructions :**

S'assurer que les modèles soient parfaitement secs, et les tremper 15 à 20 minutes dans la solution MODEL GLOSS.

Ce temps écoulé, sortir les modèles et les rincer à l'eau.

Puis les sécher et les frotter avec un chiffon doux jusqu'à obtention du vernis souhaité.

#### **Important :**

Stocker dans une boîte hermétique. MODEL GLOSS est un savon liquide spécial qui se solidifie dès lors que l'eau qu'il contient s'évapore suite à une exposition à l'air ambiant.

Si le vernis devient solide, il faut y ajouter de l'eau chaude et agiter pour qu'il retrouve son état d'origine.

(Pour de meilleurs résultats, on peut utiliser de l'eau distillée qui évite les décolorations possibles avec l'eau du robinet).



BP20334 - 67411 ILLKIRCH CEDEX - France  
Tel: (33) 3 88 40 67 40 Fax: (33) 3 88 67 96 95  
[www.rmoeurope.com](http://www.rmoeurope.com)