

NOTICE D'INSTRUCTIONS TOURNEVIS LINGUAL G0233

Le Tournevis lingual a été conçu pour insérer et retirer les Dispositif Temporaire d'Ancrege Dual-Top (TADs) sur les zones osseuses des mâchoires maxillaires et mandibulaires. L'instrument devra être utilisé par des praticiens qualifiés.

Mode d'emploi

1 Avant utilisation

- Vérifier que l'assemblage du tournevis lingual est correct, don état de propreté et de stérilisation.
- Nettoyer le contre angle, puis lubrifier et stériliser avec le manche contre angle et le manche. (Après assemblage du manche et du contre angle, ils peuvent être stériliser, and chacun des composants doit être stérilisé avant utilisation)
- La méthode et les conditions de stérilisation recommandées sont :
 - Stérilisation à la vapeur (Autoclave)
 - Conditions de stérilisation : 15 mn à 132°C

2. Comment l'utiliser



Contre angle

Adaptateur

Volant


Manche

- Après stérilisation, insérer le contre angle au manche dans le sens souhaité (voir assemblage du contre angle).
- Fixer la vis (implant) en utilisant la clé embout adaptée au modèle sélectionné.
- Tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour l'insertion et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche) pour le retrait.

3. Nettoyage et maintenance après utilisation

- Après avoir séparé le contre angle et le manche, nettoyer et sécher.
- Après vérification de l'état de propreté, le contre angle devra être lubrifié. (se reporter à « Nettoyage et lubrification du contre angle »).
- Après assemblage du dispositif, vérifier son fonctionnement.
- Après stérilisation, stocker le dispositif dans un environnement frais et sec

Comment assembler l'adaptateur de lubrification

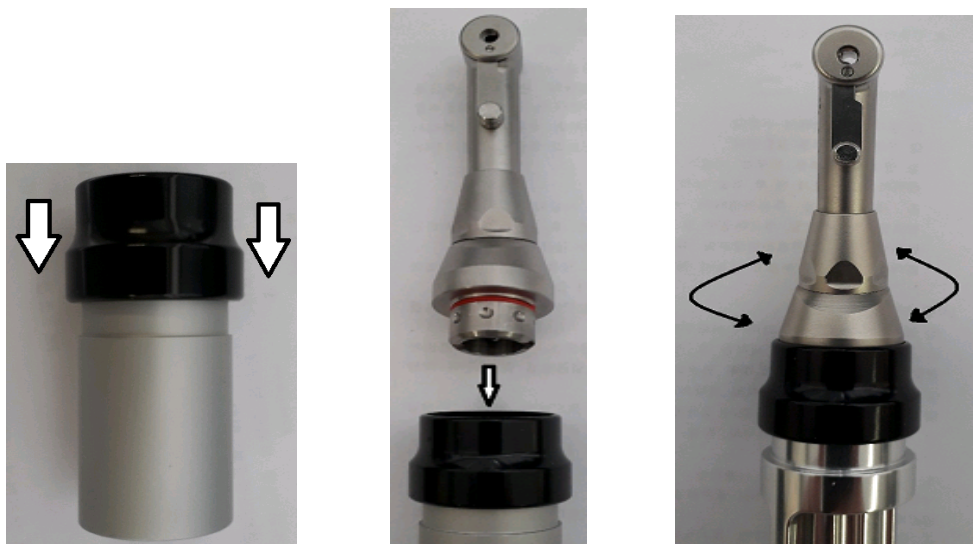


- Pousser le capuchon de la pièce adaptateur vers le bas
- Insérer la pièce contre angle dans la pièce adaptateur
- Tourner légèrement la pièce contre angle vers la droite ou vers la gauche pour laisser le capuchon de la pièce adaptateur revenir dans sa position initiale et ainsi confirmer que l'assemblage est correct.
- Après lubrification, pousser le capuchon vers le bas et retirer le contre angle séparément.

Nettoyage et lubrification du contre angle

- Faites un nettoyage par ultrasons
 - Utiliser une seringue contenant de l'air comprimé, nettoyer/sécher la tête et le bas de l'interface du contre angle pour retirer toute eau restante et corps étranger.
 - Fixer l'adaptateur de lubrification et lubrifier les joints en utilisant un lubrifiant à base d'huile. Nettoyer / sécher la tête et la base de l'interface du contre angle en utilisant la pression d'air d'une seringue afin de retirer l'excès de lubrifiant. (voir assemblage de l'adaptateur de lubrification.)
 - Stériliser à la vapeur
- NOTE : Manipuler le contre angle avec précaution. Tout impact peut endommager un composant du dispositif.

Comment assembler l'adaptateur de lubrification

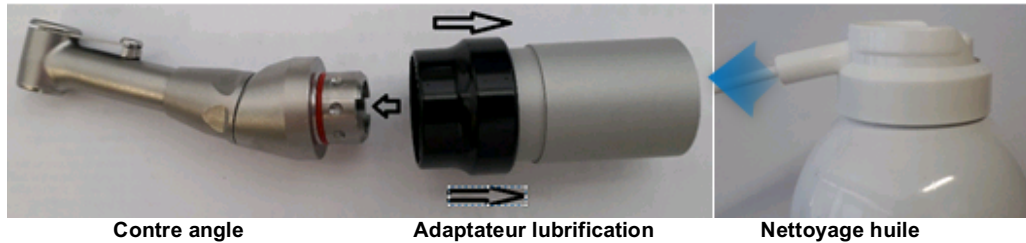









- Pousser le capuchon de la pièce adaptateur vers le bas
- Insérer la pièce contre angle dans la pièce adaptateur
- Tourner légèrement la pièce contre angle vers la droite ou vers la gauche pour laisser le capuchon de la pièce adaptateur revenir dans sa position initiale et ainsi confirmer que l'assemblage est correct.
- Après lubrification, pousser le capuchon vers le bas et retirer le contre angle séparément.


AVERTISSEMENTS

Précautions à l'utilisation

- Seuls les praticiens qualifiés sont autorisés à utiliser ce produit.
- Avant utilisation, nettoyer le produit et stériliser le en conformité avec les normes sur les méthodes et conditions de stérilisation.
- Contre angle ECG0233 (111-LD-020), la lubrification est exigée. Lubrifiez en respectant les méthodes et instructions de lubrification.
- Seules les clés embouts fabriquées par le fabricant (Jeil Medical Corporation) doivent être utilisé avec ce tournevis lingual.
- Stériliser avant utilisation les clés embouts selon la méthode de stérilisation recommandées par le fabricant.
- Si vous ne suivez pas les recommandations de maintenance du fabricant (Méthode de stérilisation, de nettoyage, de lubrification), cela aura un effet sur la durée de vie des produits.
- Méthodes et conditions de stockage : Il est recommandé de stocker le dispositif dans un environnement frais et sec.

Description des symboles

 REF Référence de l'article	 LOT N° de lot
 Date de fabrication	 Ne pas utiliser si emballage est edommagé
 Fabriqué par	 Attention
 Non-Stérile	 Consulter les instructions d'utilisation

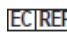 Représentant autorisé dans la Communauté Européenne

 **EMERGO EUROPE**
Molenstraat 15, 2513 BH, The Hague, The Netherland
Tel (31) (0) 70 345 8570 Fax (31) (0) 70 346 7299

Distribué par RMO Europe – 300 Rue Geiler de Kaysersberg – 67411 ILLKIRCH - FRANCE